

# BC-17

クラスBオートクレーブ



Thinking ahead. Focused on life.

〒513-0932 福岡市東区土井3丁目16番15号


株式会社 ワールド・テン

TEL 092-691-4886  
FAX 092-691-4806

# BC-17

滅菌クオリティは「クラスB」へ

血液を介した感染のリスクが高まるなか、スタンダードプリコーションの考え方に基づいた感染予防対策も高いレベルが求められています。そこで、モリタは院内感染予防システムのひとつとして、「クラスBオートクレーブ BC-17」をラインナップいたします。JIS規格に適合し、厳格とされるヨーロッパ規格(EN13060)にも準拠するBC-17は、患者さんやスタッフへ、より安全な診療環境を提供いたします。

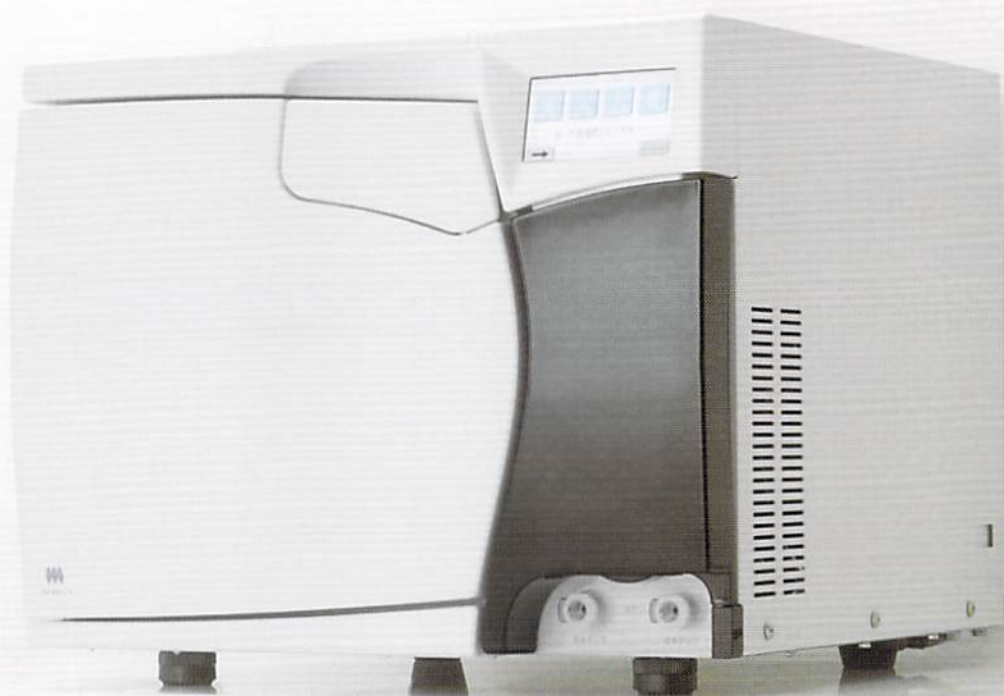

# New Features


## クラスBオートクレーブ BC-17



### 真空と蒸気注入を繰り返す プレポストバキューム方式

真空ポンプにより、チャンバー内の空気を除去する「プレポストバキューム方式」を採用。真空状態と蒸気の注入を3回繰り返すことで、内腔物や多孔性材料内部の残留空気を取り除き、蒸気を細部まで行きわたらせることができます。包装されたハンドピースや長いチューブ、細かいインスツルメントなど、さまざまな種類や形状の被滅菌物をより効率よく滅菌することが可能となりました。

## 重力置換式のオートクレーブ

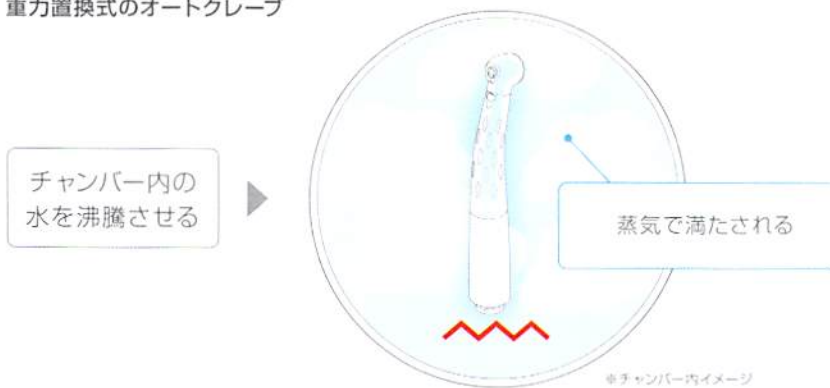

### 蒸気圧を利用する一般的なオートクレーブ

蒸気圧を利用して滅菌を行う一般的なオートクレーブは、蒸気の圧力で残留空気を上方から下方へと取り除く方式です。しかし、蒸気の循環性が低いため、主に非包装のミラーやピンセットなど内腔のない固形物の滅菌に多く用いられています。

※一部、包装品や内腔物の滅菌に対応した機種もございます。



### 給水しやすいカートリッジタンク

本体上部に収納されたカートリッジタンクにより、精製水の給水を簡単に行うことができます。また、本体の給水槽も汚れません。



### わかりやすい日本語表示のタッチパネル

タッチパネルのディスプレイは全て日本語表示。設定はもちろん、万が一エラー表示が出た際も一目で内容がわかります。



### コンパクトPCDイエローをラインナップ

ハンドピースなどの内腔物を想定したデンタル用の滅菌インジケータ「コンパクトPCDイエロー(別売)」で、簡単に複雑な器材の内腔レベルにおける滅菌モニタリングが可能です。

### 多彩な滅菌コース

Bサイクル			
121°C/約20分	134°C/約4分 通常乾燥	134°C/約4分 短縮乾燥	134°C/約4分 デンタルモード (ソフト乾燥)
トータル約58分	トータル約41分	トータル約32分	トータル約44分
プリオンサイクル		テストサイクル	
134°C/約18分 通常乾燥 トータル約52分		Bowie&Dick試験 Helix試験 トータル約32分	バキュームテスト トータル約25分

※トータル時間は被滅菌物の量により延びる場合があります。

### EN13060に準拠した 国産のクラスBオートクレーブ


医療先進国であるヨーロッパの厳しい基準EN13060に準拠した、クラスBオートクレーブです。

- ※EN13060の要件(抜粋)
- ・各工程を検証し記録が残ること。
  - ・使用水が使いきりであること。
  - ・Bowie&Dick試験・Helix試験モードがあること。
  - ・バクテリアフィルターを採用していること。

# Various functions

## 器具を傷めないソフト乾燥モード

滅菌後、最高到達温度が134℃以下で乾燥を行うソフト乾燥モードを搭載。ハンドピースや、耐熱性樹脂製品にもご使用いただけます。

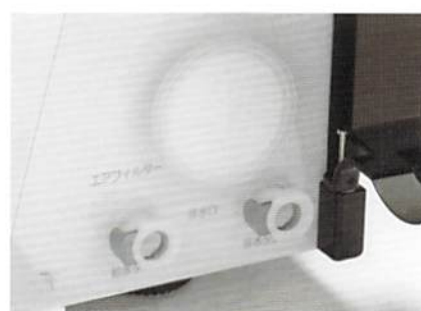

## バクテリアフィルター搭載

扉を閉じたまま外気を吸引し、乾燥を行えるバクテリアフィルターを搭載。ホコリや菌類の混入を防ぐ衛生的なエアフィルターです。

# Specifications

販売名: クラスBオートクレーブ BC-17  
型式: BC-17  
電源電圧: 単相200V ±10%  
消費電力: 1,280W  
質量: 53kg  
一般的名称: 小型包装品用高圧蒸気滅菌器  
機器の分類: 管理医療機器(クラスII)/特定保守管理医療機器

外形寸法: W480×D568×H415mm  
チャンバー寸法: Φ250×D360mm(有効寸法 320mm)  
滅菌モード: 6パターン  
滅菌時間: 121℃/20分、134℃/4分・18分  
乾燥時間: 5・14分  
貯水槽容量: 給水2L(約5回分)、排水3.5L(約7回分)

医療機器認証番号: 225AKBZX00091A01  
付属品: 網バスケット




標準価格: 998,000円 [272001](#)

## Item Line up



アルミトレイ  
5,000円 [272002](#)

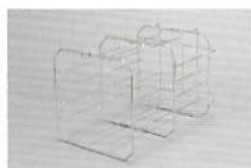


トレイ棚(棚枠)  
※トレイハンガー別売  
28,000円 [272003](#)



バクテリアフィルター  
4,200円 [272005](#)



コンパクトPCDイエロー  
CI 100枚付  
51,000円 [272011](#)

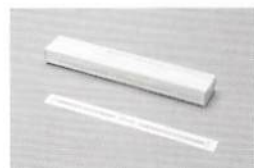

ネスコスト-C  
ICSスチーム  
2,200円 [272017](#)



アイオニー  
79,000円 [161300](#)  
W115×D110×H454mm  
製造 株式会社東京技研



アシュアープラス  
製造 サルタン

(200枚入) W83×H165mm	2,900円 <a href="#">620010</a>
W70×H254mm	2,900円 <a href="#">620011</a>
W89×H254mm	2,900円 <a href="#">620012</a>
W140×H279mm	4,700円 <a href="#">620013</a>
W178×H330mm	6,800円 <a href="#">620014</a>
W254×H381mm	10,600円 <a href="#">620015</a>

(100枚入) W305×H457mm	6,900円 <a href="#">620016</a>
---------------------	-------------------------------



販売

株式会社 **モリタ**

大阪本社 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525  
東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 TEL 03. 3834 6161

製造販売 チヨダエレクトリック株式会社  
長野県千曲市大字新田124 〒387-0018

発売 株式会社IHIシバウラ

Morita Global Site: [www.morita.com](http://www.morita.com)


More Infos about Products: [www.dental-plaza.com](http://www.dental-plaza.com)

ご使用に際しましては、製品の添付文書および取扱説明書を必ずお読みください。  
仕様及び外観は製品改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。  
製品の色は印刷のため、実際とは異なる場合がございます。

PUB: NO. M207.1952-1-000.1311.67.000NN-JPC

## WD-150

ウォッシャー・ディスイنفクター

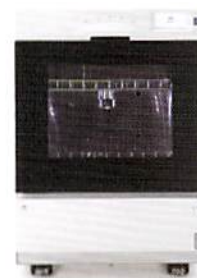

標準価格: 1,730,000円 [272101](#)

販売名: ウォッシャー・ディスイنفクター WD-150

一般的名称: 器具除染用洗浄器  
機器の分類: 一般医療機器(クラスI)

医療機器届出番号: 20B2X10010000002

製造販売: チヨダエレクトリック株式会社

発売: 株式会社IHIシバウラ

## MICS

Morita Infection Control System

モリタは院内感染予防を総合的にプロデュースします。